

## EC2 Electrode Cream

Pasta elektrodowa EC2



Do użytku zewnętrznego z elektrodami rejestrującymi.

W celu uzyskania optymalnej jakości należy używać oryginalnych elektrod firmy Grass.

W celu przedłużenia okresu przydatności do użytku przechowywać w chłodnym miejscu.

Użycie tego produktu w sposób niezgodny z opisem na opakowaniu jest naruszeniem Prawa Federalnego.

1. Używać tylko na powierzchniach zewnętrznych przez osoby zawodowo związane z badaniami neurofizjologicznymi. Oczyszczyć miejsce mocowania elektrody łagodnym rozpuszczonym detergentem. Rozetrzeć małą ilość EC2 na skórze. Nałożyć większą ilość i umieścić w niej elektrodę. Delikatnie docisnąć do EC2 mały gazik aby ją umocować.
2. Aby usunąć należy szybko zmyć EC2 przy pomocy łagodnego detergentu. EC2 twardnieje na powietrzu, tak więc opóźnione zmywanie staje się trudniejsze. Pokrycie EC2 wazeliną lub hypoalergicznym sprayem do włosów przedłuża czas wysychania.  
EC2 jest izotoniczna w stosunku do skóry, ale przedłużony kontakt, jak w przypadku każdego obcego materiału, może powodować podrażnienie. Nie zbliżać do oczu.  
Usunąć wszystkie pozostałości przed rentgenodiagnostyką. EC2 może blokować częstotliwości radiowe. Nie zawiera chlorku wapnia.
3. Jeśli to możliwe należy zużyć EC2 przed końcem okresu przydatności do użytku. Po upływie terminu przydatności do użytku może być stosowana, jednak może zgęstnieć.

**Grass Product Group, Astro-Med., Inc. • 600 East Greenwich Avenue. • West Warwick, RI 02893. • Phone: 401.828.4000 • Fax: 401.822.2430**

